

# HeartSine samaritan® PAD Upgrader (1.4.1/2.0.6)

## Nutzeranweisungen

1

### Nach dem Download und der Installation von PadUpgrader:

Auf das PADUpgrader-Symbol  auf dem Computer-Desktop klicken oder den Start-Menü-Button drücken und PADUpgrader auswählen

Nach einigen Sekunden sollte das Fenster 'PAD Upgrader-(1.4.1/2.0.6)' erscheinen.




2

### Das PAD mit einem USB-Anschluss des Computers verbinden.


Nach einigen Sekunden erscheint das Symbol samaritan® PAD und die Kontrollleuchte für die Verbindung wird grün.

samaritan® PAD-Symbol  
Kontrollleuchte für Verbindung

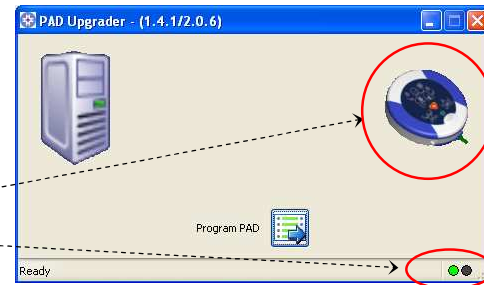


3

### Upgrade durchführen.

Zum Starten des Upgrades Auf den 'Program PAD  - Button klicken.

Alle Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

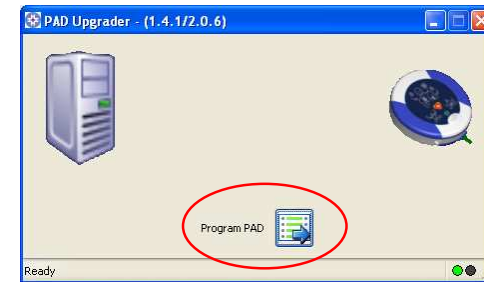

4

### Zurücksenden des Upgrade-Nachweises.

Nach einem erfolgreich durchgeführten Upgrade wird auf Ihrem Desktop eine pdf-Datei erstellt. Bitte senden Sie dieses an eine der folgenden Adressen:

1. E-Mail an [support@heartsine.com](mailto:support@heartsine.com)
2. Ausdrucken und per Post an:  
HeartSine Technologies  
Canberra House  
203 Airport Road West  
Belfast  
BT3 9ED  
United Kingdom
3. Fax an +44 (0)28 9093 9401




5

### Dieser Schritt gilt nur für das SAM 300. Es gilt NICHT für SAM 300P-Geräte.

Nach einem erfolgreichen Upgrade prüfen, dass an dem Gerät ein AHA/ERC 2005-Label angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, das mitgelieferte Label wie gezeigt anbringen.

AHA/ERC 2005  
150J-150J-200J

AHA/ERC 2005  
150J-150J-200J

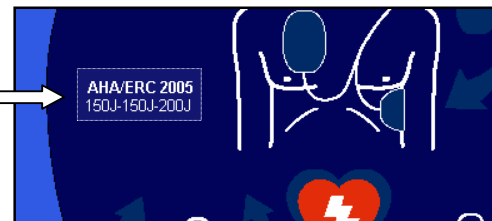

## Wichtige Warnung



Bei Auftreten eines Fehlers zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Upgrades **darf** das samaritan® PAD **nicht verwendet werden**, bis das Upgrade erfolgreich beendet wurde.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie eine E-Mail an

[support@heartsine.com](mailto:support@heartsine.com)