

HeartSine samaritan® PAD Upgrader (1.4.2/3.2.0)


Nutzeranweisungen

1

Nach dem Download und der Installation von PadUpgrader:

Auf das PADUpgrader-Symbol  auf dem Computer-Desktop klicken oder den Start-Menü-Button drücken und PAD Upgrader auswählen

Nach einigen Sekunden sollte das Fenster 'PAD Upgrader-(1.4.2/3.2.0)' erscheinen.

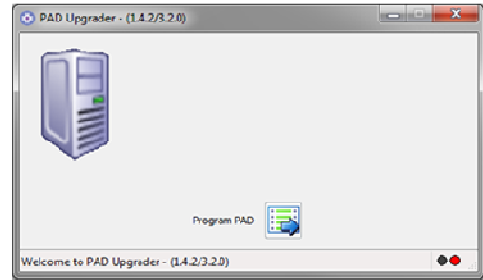


2

Das PAD mit einem USB-Anschluss des Computers verbinden.

Nach einigen Sekunden erscheint das Symbol samaritan® PAD und die Kontrollleuchte für die Verbindung wird grün.


samaritan® PAD-Symbol

Kontrollleuchte für Verbindung

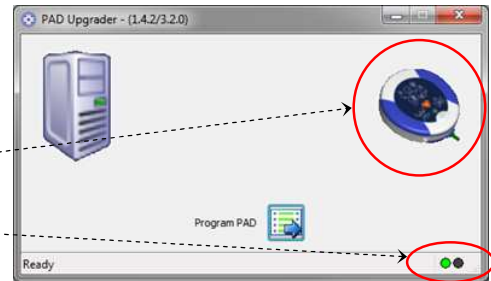


3

Upgrade durchführen.

Zum Starten des Upgrades Auf den 'Program PAD'  - Button klicken.

Alle Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

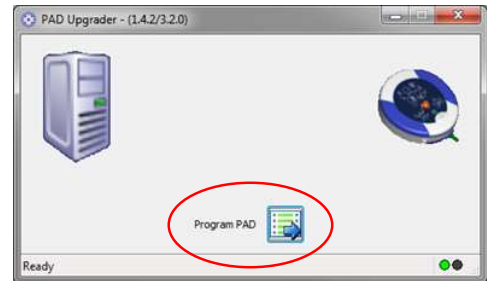

4

Zurücksenden des Upgrade-Nachweises.

Nach einem erfolgreich durchgeführten Upgrade wird auf Ihrem Desktop eine pdf-Datei erstellt. Bitte senden Sie dieses an eine der folgenden Adressen:

1. E-Mail an support@heartsine.com
2. Ausdrucken und per Post an: HeartSine Technologies
Canberra House
203 Airport Road West
Belfast
BT3 9ED
United Kingdom
3. Fax an +44 (0)28 9093 9401



Wichtige Warnung



Bei Auftreten eines Fehlers zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Upgrades **darf** das samaritan® PAD **nicht verwendet werden**, bis das Upgrade erfolgreich beendet wurde.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie eine E-Mail an support@heartsine.com