


Actualizador para el PAD samaritan® de HeartSine (1.4.1/2.0.6)


Instrucciones para el usuario

1

Siga las instrucciones de descarga del Actualizador para el PAD (PADUpgrader):

Haga clic en el icono PadUpgrader  ubicado en el escritorio del ordenador, o presione el botón del menú Inicio y seleccione PADUpgrader

Al cabo de unos segundos se abrirá la ventana 'PAD Upgrader-(1.4.1/2.0.6)'

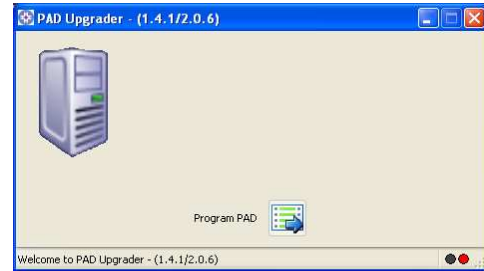


2

Conecte el PAD al puerto USB del ordenador.


Al cabo de unos segundos aparecerá el icono del PAD samaritan® y el indicador de conexión se pondrá verde.

icono del PAD samaritan®
indicador de conexión

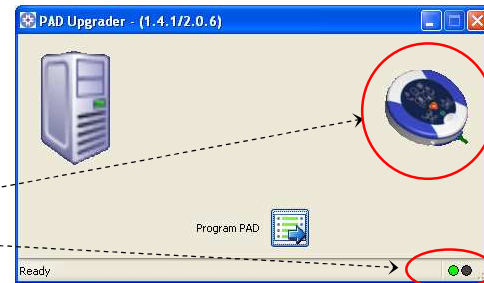


3

Realice la actualización.

Haga clic en el botón 'Program PAD'  para comenzar con la actualización.

Siga las instrucciones de la pantalla.

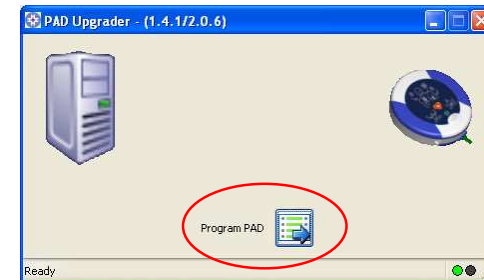


4

Envíe la Prueba de actualización.

Luego de actualizar con éxito, se creará un archivo pdf en su Escritorio. Por favor, envíelo de una de las formas siguientes:

1. Por email a support@heartsine.com
2. Impreso y por correo a:
HeartSine Technologies
Canberra House
203 Airport Road West
Belfast
BT3 9ED
Reino Unido
3. Por fax al +44 (0)28 9093 9401

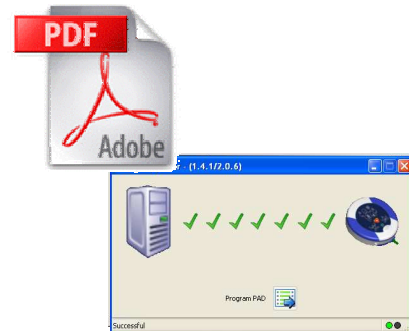

5

Este paso sólo se aplica al SAM 300. No se aplica a todos los dispositivos SAM 300P.

Después de actualizar con éxito, verifique que el dispositivo tenga la etiqueta AHA/ERC 2005. Si no la tiene, busque y pegue la etiqueta proporcionada como se muestra.

AHA/ERC 2005
150J-150J-200J



Advertencia importante



Si ocurre un error en algún punto de la actualización, **no debe utilizarse** el PAD samaritan® hasta que se haya realizado la actualización con éxito.

Si tiene consultas, póngase en contacto con su distribuidor o envíe un email a support@heartsine.com