


# Actualizador para el PAD samaritan® de HeartSine (1.4.2/3.2.0)


## Instrucciones para el usuario

1

### Siga las instrucciones de descarga del Actualizador para el PAD (PADUpgrader):

Haga clic en el icono PadUpgrader  ubicado en el escritorio del ordenador, o presione el botón del menú Inicio y seleccione PADUpgrader

Al cabo de unos segundos se abrirá la ventana 'PAD Upgrader-(1.4.2/3.2.0)'

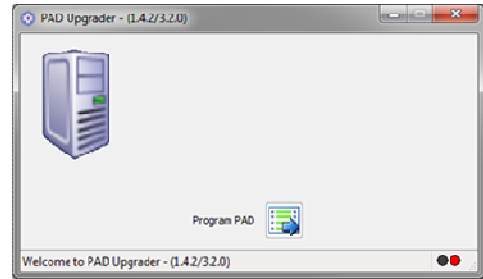


2

### Conecte el PAD al puerto USB del ordenador.

Al cabo de unos segundos aparecerá el icono del PAD samaritan® y el indicador de conexión se pondrá verde.

icono del PAD samaritan®  
indicador de conexión

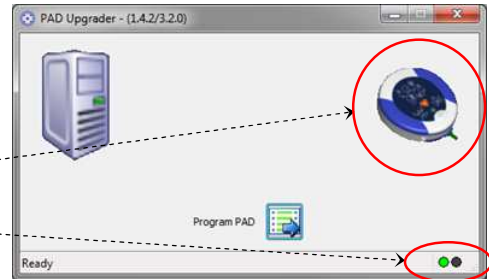


3

### Realice la actualización.

Haga clic en el botón 'Program PAD ' para comenzar con la actualización.

Siga las instrucciones de la pantalla.

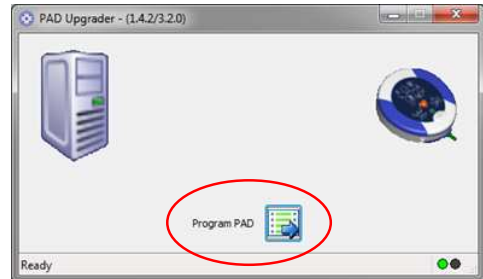


4

### Envíe la Prueba de actualización.

Luego de actualizar con éxito, se creará un archivo pdf en su Escritorio. Por favor, envíelo de una de las formas siguientes:

1. Por email a [support@heartsine.com](mailto:support@heartsine.com)
2. Impreso y por correo a: HeartSine Technologies  
Canberra House  
203 Airport Road West  
Belfast  
BT3 9ED  
Reino Unido
3. Por fax al +44 (0)28 9093 9401

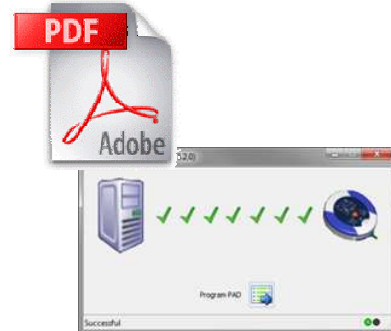

## Advertencia importante



Si ocurre un error en algún punto de la actualización, **no debe utilizarse** el PAD samaritan® hasta que se haya realizado la actualización con éxito.

Si tiene consultas, póngase en contacto con su distribuidor o envíe un email a [support@heartsine.com](mailto:support@heartsine.com)